

// Vervangen Reagentia




- 1 Kies bovenin het tabblad 'Reagent Setup'
- 2 Vink het te vervangen reagens aan en druk vervolgens op 'Setup'.
- 3 Ga hier op barcode staan en scan de nieuwe fles reagens met de barcodereader in.
- 4 Als het inscannen is gelukt Verschijnt er "barcode loading succeeded".



- 5 Druk nu op 'Apply' en hierna op 'Close'.
- 6 Bevestig met 'OK'.
- 7 Het instrument gaat zich nu vullen met het nieuwe reagens. Hierna bent u klaar. Voor vervangen van ander reagens deze zelfde procedure herhalen.
- 8 Door het tabblad 'Sample Analysis' te kiezen keert u terug naar het meetscherm.

// Algemene instellingen voor de BC-5000 Vet

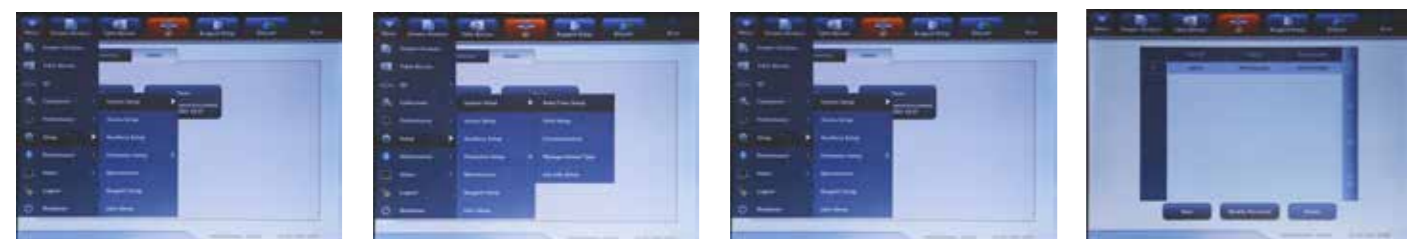

- 1 Voor instellingen ga via 'Menu' naar 'Setup'.
- 2 Date/Time Setup: Datum en tijd wijzigen. Print Setup: Printer aanpassen of printwijze. Communication: Koppeling met computer aanpassen.
- 3 Om inlognamen (User ID) en wachtwoorden aan te maken gaat u naar 'Access Setup'.
- 4 Via 'New' kunt u een nieuwe gebruiker en wachtwoord aanmaken. Via 'Modify Password' of 'Delete' kunt een bestaande gebruiker aanpassen of verwijderen.



// Diverse informatie BC-5000 Vet



De LH-Lyse en DIFF-Lyse bevinden zich achter het deurtje aan de linkerzijde van het instrument.

Probe Cleanser 50 ml (artikelnummer: 105-002225-00)



Menarini Benelux N.V./S.A. | Diagnostics Division

De Kleetlaan 3 | 1831 Diegem | Belgium
T (+32) 2 721 49 30 | F (+32) 2 721 50 49 | mail@menariniagnostics.be
BTW/TVA BE 0403.075.481
www.menariniagnostics.be



De Haak 8, NL | 5555 XK Valkenswaard | The Netherlands
T (+31) 40 208 20 00 | F (+31) 40 204 21 84 | mail@menariniagnostics.nl
BTW NL 009.664.750B01
www.menariniagnostics.nl
A division of Menarini Benelux S.A./N.V. B-1831 Diegem - K.v.K. Eindhoven nr : 17085642



// BC-5000 VET

Handleiding



// Inhoudsopgave

- Algemene Informatie
- Werkwijze monstermeting
- Terugzoeken uitslagen
- Uitschakelen BC-5000 Vet
- Vervangen reagentia
- Algemene instellingen voor de BC-5000 Vet
- Diverse informatie BC-5000 Vet




// Algemene Informatie

- Vervang de reagentia iedere 3 maanden (ook als deze niet op zijn). Gebeurt dit niet, dan worden de uitslagen minder betrouwbaar.
- Gebruik geen reagentia die over de datum zijn.
- Gebruik alleen EDTA-buizen.
- Biedt nooit een gestold monster aan. Dit kan foute uitslagen of ernstige technische problemen veroorzaken. Controleer dit door de buis van tevoren te zwenken en met blote oog te beoordelen.



// Werkwijze monstermeting

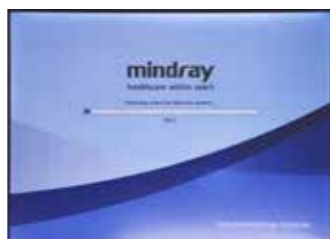

1 Zet de BC-5000 Vet aan met de schakelaar aan de achterzijde van het instrument. Het instrument is na ongeveer na 5 minuten gebruiksklaar.



2 Voer de User-ID en het wachtwoord in en druk op 'Login'. Dit is hoofdlettergevoelig.



3 Druk op 'Next Sample' om de gegevens van het te meten monster in te voeren.



4 Vul de benodigde patiëntinfo in, minimaal 'Sample ID' en 'Species', en druk op 'OK'.



5 Zwenk het EDTA-monster 10x en steek de opzuignaald in de buis (niet op de bodem zetten) en druk op de grote knop achter de opzuignaald. Het monster wordt opgezogen, de naald wordt ingetrokken en u kunt de buis na de piep verwijderen.



6 Na 1 minuut verschijnt de uitslag op het scherm.



7 Door op de 'Scattergram' te drukken vouwt het scherm verder open voor meer info over de differentiatie.




8 Door op de kolom parameter te drukken krijgt u de uitslag in beeld met de referentiewaarden ernaast.

// Terugzoeken uitslagen



1 Druk op het tabblad 'Table Review'. Met de pijl-toets kunt door het menu lopen tot u de gewenste uitslag gevonden heeft. Of u zoekt met de toets 'Search'.

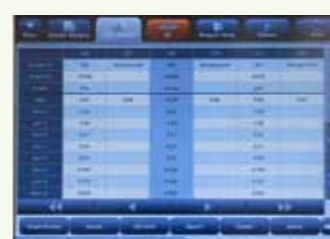

2 Door op de kolom te drukken selecteert u de gezochte uitslag en de hele kolom wordt blauw.



3 Druk op 'Comm' om de uitslag nogmaals naar de computer te zenden. Druk op 'Graph Review' om de uitslag te bekijken.



4 Het gezochte resultaat verschijnt op het scherm. U kunt 'deze printen door op de printknop te drukken.

// Uitschakelen BC-5000 Vet



1 Druk linksboven op 'Menu' en kies vervolgens de optie 'Shutdown'.



2 Indien u echt wil afsluiten drukt u hier op 'OK'.




3 Het toestel vraagt nu of u de Probe Cleanser wil opzuigen.



4 Steek de opzuignaald in de flacon 'Probe Cleanser' en druk op de grote knop achter de opzuignaald. Verwijder de flacon na de piep.



5 Het instrument spoelt zichzelf gedurende enkele minuten.

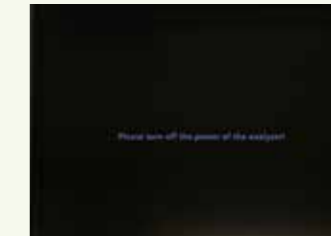

6 U mag nu de BC-5000 Vet uitschakelen met de schakelaar aan de achterzijde van het instrument.

