

Skyla VB1+

PROTOCOL SINGLE/DUAL TESTEN UPC TEST




Benodigdheden voor losse testen

Adapter

Pipet
50 μ l

Diluent
(600 μ l)

Pipettip

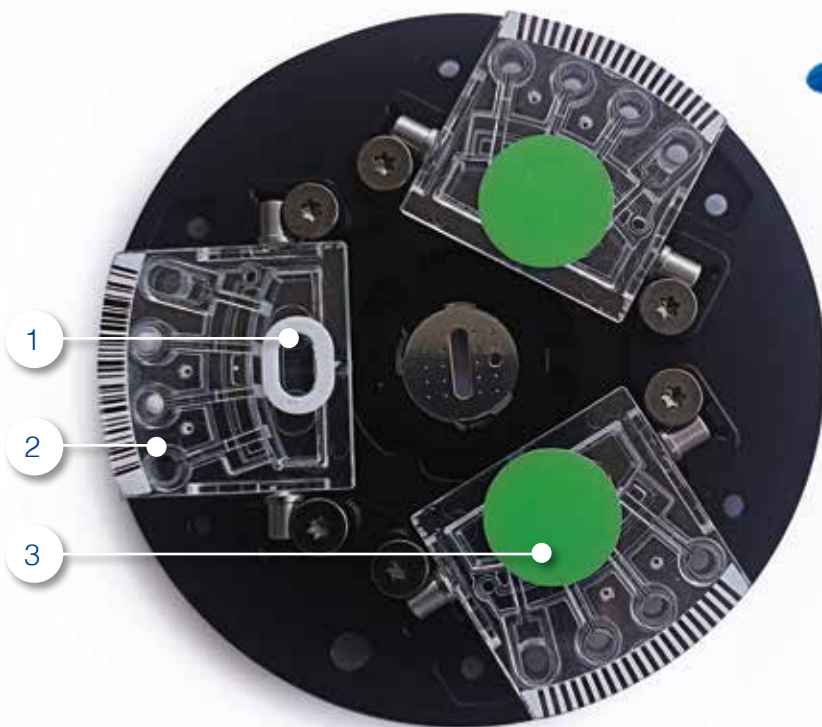

1. Vulopening 2. Single/Dual Test 3. Balancer

Analyse

Stap 1: Centrifugeren van monster



1. Volg de instructies voor de centrifuge: 10 min/3000rpm of 5 min/6000rpm

Stap 2: Voorbereiding Single/Dual Test



2. Haal de test uit de verpakking en houd vast aan de zijkant



3. Zet met de barcode aan de buitenkant de test in de adapter



4. Klik de test in de adapter



5. Druk de test met de vinger aan




6. Altijd 3 clips in de adapter

Stap 3: Voorbereiding en Meting Monster



7. De buis bevat 600 μ l diluent. Voor gebruik even centrifugeren in verband met vloeistof in de dop.

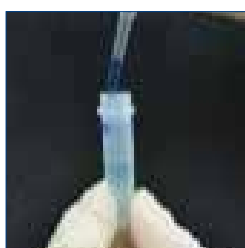

8. Gebruik de 50 μ l pipet om 50 μ l monster op te zuigen en pipetteer deze in de buis diluent



9. Sluit de buis af met de dop en hierna 10 keer zwenken.



10. Gebruik een nieuwe pipetpunt en pipetteer 100 μ l in de testclip door met de 50 μ l pipet 2 keer op te zuigen uit het verdunde monster



11. Leg de adapter in de VB1+ en start de meting.